


제품 설명서

1. 사용목적

- 무릎관절위에 장착하여 의지를 회전할 수 있는 장치

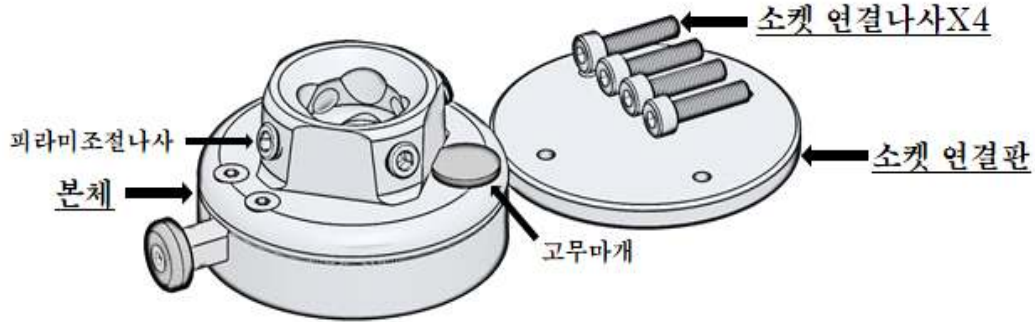

2. 구성품

- 본체 1EA, 소켓 연결판 1EA, 소켓 연결나사 4EA, 제품설명서

3. 제품 특징

- 4개의 조절나사로 대퇴의족 및 피라미드 소켓어댑터와 연결
- 바지나 신발을 신거나 교차다리로 앉을 때 사용

4. 사용방법

- 본체 고무마개를 분리 후 소켓 연결나사를 삽입하여 소켓 연결판에 체결한다.

5. 제품사양

- 크기 : 지름 87mm x 높이 38mm
- 무게 : 219.3g
- 회전각도 : 360도
- 작동방식 : 버튼 회전식
- 허용체중 : 100Kg
- 결합방식 : 4홀 나사 체결

- | |
|---------------------------------------|
| 1) 품목명 : 회전테이블 |
| 2) 모델명 : H-RT-100 |
| 3) 제조번호 : H-RT100-2404-1-065 |
| 4) 제조일자 : 2024. 04. 03 |
| 5) 보증기간 : 납품일로부터 18개월 |
| 6) 포장단위: 1EA/Pack |
| 7) 제조/판매 : (주)HT&C TEL: 070-7135-7778 |
| 경기도 부천시 부천로 391번길 30 |